

DK

QUICKGUIDE

Echo MiniTech Pro

MiniTech Pro funktioner



Brugsvejledning

1. Sørg for at MiniTech Pro er slukket.
2. Drej bælteklipsen mod uret for at fjerne den fra batteridækslet.
3. Tryk forsigtigt nedad på batteridækslet for at åbne og sæt herefter 2 stk. AA batterier i.
4. Luk batteridækslet
5. Sæt bælteklipsen i og drej den med uret for at fastgøre den.
6. Sæt stumpmikrofonen (5) eller mikrofonen med ledning (3) i mikrofonindgangen.

Stumpmikrofonen er designet til samtaler, møder og når du behov for at bevæge dig rundt. Mikrofonen med ledning er velegnet til, at opfange lyd fra andre lydkilder såsom TV. Her kan du placere mikrofonen ved højtaleren – du kan fastgøre mikrofonen med det medfølgende stykke Velcro.

Du kan forlænge mikrofonens ledning med den medfølgende forlængerledning (8). Det er muligt at bruge op til to forlængerledninger på en gang.

7. Tilslut hovedtelefoner eller halsslynge til lydudgangen.
8. Sæt dit høreapparat på T-indstilling, hvis du bruger teleslyngen.
9. Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde din MiniTech Pro. Tænd/sluk-knappen vil nu lyse grønt og lydstyrkeindikatoren lyser blå i to sekunder.
10. Du kan justere lydstyrken ved at trykke på + eller –
Lydstyrkeindikatoren lyser blå, og viser dig det nuværende lydniveau med blå, grønt og rødt lys – blå er lavt lydniveau, grønt er mellem lydniveau og rød er højt lydniveau.

Bemærk: Jo højere lydstyrke du anvender, jo mere strøm vil din MiniTech Pro bruge. Start altid ud med en lav volumen, og skru herefter op efter behov.

Vigtigt: Hvis du ikke kan skru op for lyden, så sluk for din MiniTech Pro og tjek herefter at både mikrofon og hovedtelefoner eller halsslynge er korrekt sat i.

11. For at justere tonen drejer du blot på tonehjulet. Mod uret giver mere diskant og med uret giver mere bass.

12. Hvis du ønsker at forbinde din MiniTech Pro til et teleslyngesystem i det offentlige rum, så skal du:
 - a. Slukke din MiniTech Pro.
 - b. Sætte hovedtelefoner i lydudgangen.
 - c. Aktivere T-funktionen ved at trykke på knappen – knappen lyser rødt når den er aktiveret.
 - d. Juster lydstyrken så den er behagelig.
 - e. Placer din MiniTech Pro et sted, hvor den kan modtage signaler fra teleslyngesystemet.
13. De fleste produkter med en lydudgang kan sluttes direkte til din MiniTech Pro med et lyd kabel.
14. Du kan skifte mellem mikrofonen og AUX indgangen ved at trykke på Mikrofon/AUX-knappen.
15. Mikrofon/AUX-knappen er kun aktiv, hvis både mikrofon og AUX indgangen bruges samtidig. Mikrofonikonet lyser grønt når mikrofonen er aktiv, og AUX ikonet lyser grønt når AUX indgangen er aktiv.
16. Hvis en af de to indgange bliver deaktiveret, så vil ikonerne holde op med at lyse.