

DK BRUGERVEJLEDNING
Echo MiniTech Pro

Tillykke med din nye MiniTech Pro!

MiniTech Pro er en lille brugervenlig personlig modtager med:

- Mikrofon til samtaleforstærkning
- Teleslynge til forbindelse med telespole i høreapparat eller CI
- Telespole til forbindelse med teleslyngesystemer
- AUX kabelforbindelse til TV, computer, tablet eller andre lydkilder

MiniTech Pro er drevet af to AA batterier (inkluderet).

Indhold

| | |
|--|---|
| Tillykke med din nye MiniTech Pro! | 2 |
| Sikkerhedsinstruktioner | 3 |
| Pakkens indhold | 4 |
| MiniTech Pro funktioner | 5 |
| Brugsvejledning | 6 |
| Batterierne | 8 |
| Tekniske specifikation | 9 |
| Reserve dele | 9 |
| Specifikationer | 9 |

Sikkerhedsinstruktioner

Følg venligst instrukserne nøje, når du anvender din MiniTech Pro. Det kan være skadeligt for din hørelse, hvis du anvender produktet forkert.

MiniTech Pro er en personlig modtager, der forstærker lyden omkring dig. Det kan skade din hørelse, hvis du lytter til et for højt lydniveau i en forlænget periode.

Stumpmikrofonen, eller anden godkendt mikrofon, skal være sat helt i mikrofonindgangen inden du tænder din MiniTech Pro. Du kan blive udsat for kraftige lyde, der kan skade din hørelse, hvis du tænder MiniTech Pro inden mikrofonen er korrekt isat.

Udsæt ikke MiniTech Pro for direkte sollys, fugtige eller våde omgivelser. Produktet bør heller ikke bruges i meget kolde eller varme omgivelser.

Brug kun en blød klud, og en smule uorganisk rensmiddel.

Brug kun godkendte AA batterier til din MiniTech Pro.

Husk altid at udskifte begge batterier på samme tid. Undlad at bruge et nyt og et gammelt batteri sammen.

Tilslut kun udstyr godkendt af Hearing Products International eller Tonax.

Al service eller reparation bør kun udføres af Tonax eller producenten. Garantien er ugyldig, hvis du selv forsøger at åbne eller skille produktet ad.

Behandl din MiniTech Pro med forsigtighed, da det indeholder sensitiv elektronik.

Brugte batterier bør ikke smides i skraldespanden, men bør i stedet afleveres til genanvendelse på genbrugspladsen, eller anden opsamlingssted.

Pakkens indhold

1. MiniTech Pro modtager
2. 2 stk. AA batterier
3. Mikrofon med 1,5 m ledning
4. Klips til mikrofonen
5. Stumpmikrofon
6. QR halsspole
7. Hovedtelefoner
8. 3 m. forlængerledning



1



2



3 og 4



5



6




7



8

MiniTech Pro funktioner

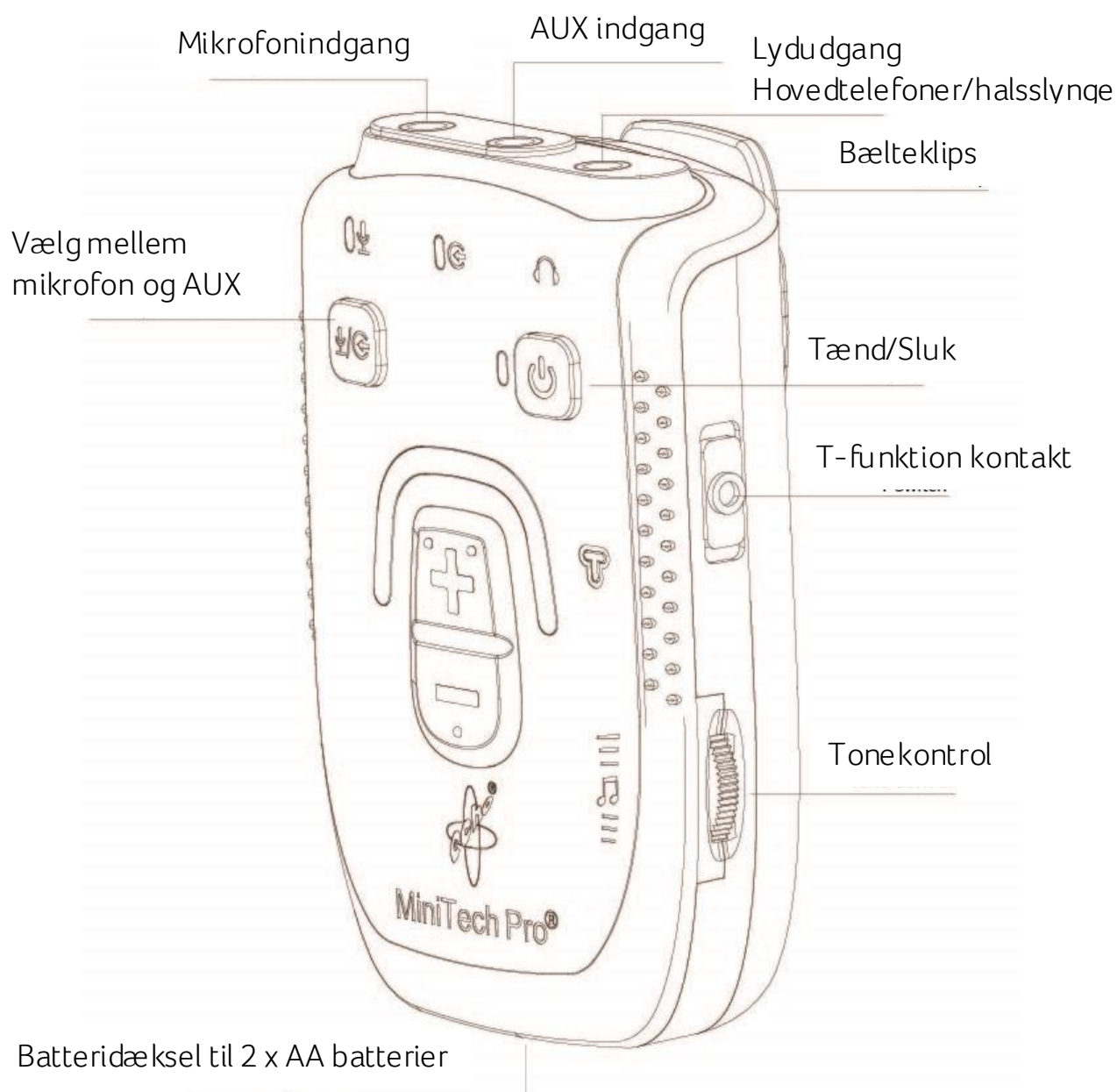

Brugsvejledning

1. Sørg for at MiniTech Pro er slukket.
2. Drej bælteklipsen mod uret for at fjerne den fra batteridækslet.
3. Tryk forsigtigt nedad på batteridækslet for at åbne og sæt herefter 2 stk. AA batterier i.
4. Luk batteridækslet
5. Sæt bælteklipsen i og drej den med uret for at fastgøre den.
6. Sæt stumpmikrofonen (5) eller mikrofonen med ledning (3) i mikrofonindgangen.

Stumpmikrofonen er designet til samtaler, møder og når du behov for at bevæge dig rundt. Mikrofonen med ledning er velegnet til, at opfange lyd fra andre lydkilder såsom TV. Her kan du placere mikrofonen ved højttaleren – du kan fastgøre mikrofonen med det medfølgende stykke Velcro.

Du kan forlænge mikrofonens ledning med den medfølgende forlængerledning (8). Det er muligt at bruge op til to forlængerledninger på en gang.

7. Tilslut hovedtelefoner eller halsslynge til lydudgangen.
8. Sæt dit høreapparat på T-indstilling, hvis du bruger teleslyngen.
9. Hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder for at tænde din MiniTech Pro. Tænd/sluk-knappen vil nu lyse grønt og lydstyrkeindikatoren lyser blå i to sekunder.
10. Du kan justere lydstyrken ved at trykke på + eller –
Lydstyrkeindikatoren lyser blå, og viser dig det nuværende lydniveau med blå, grønt og rødt lys – blå er lavt lydniveau, grønt er mellem lydniveau og rødt er højt lydniveau.

Bemærk: Jo højere lydstyrke du anvender, jo mere strøm vil din MiniTech Pro bruge. Start altid ud med en lav volumen, og skru herefter op efter behov.

Vigtigt: Hvis du ikke kan skruer op for lyden, så sluk for din MiniTech Pro og tjek herefter at både mikrofon og hovedtelefoner eller halsslynge er korrekt sat i.

11. For at justere tonen drejer du blot på tonehjulet. Mod uret giver mere diskant og med uret giver mere bass.

12. Hvis du ønsker at forbinde din MiniTech Pro til et teleslyngesystem i det offentlige rum, så skal du:
 - a. Slukke din MiniTech Pro.
 - b. Sætte hovedtelefoner i lydudgangen.
 - c. Aktivere T-funktionen ved at trykke på knappen – knappen lyser rødt når den er aktiveret.
 - d. Juster lydstyrken så den er behagelig.
 - e. Placer din MiniTech Pro et sted, hvor den kan modtage signaler fra teleslyngesystemet.
13. De fleste produkter med en lydudgang kan sluttes direkte til din MiniTech Pro med et lyd kabel.
14. Du kan skifte mellem mikrofonen og AUX indgangen ved at trykke på Mikrofon/AUX-knappen.
15. Mikrofon/AUX-knappen er kun aktiv, hvis både mikrofon og AUX indgangen bruges samtidig. Mikrofonikonet lyser grønt når mikrofonen er aktiv, og AUX ikonet lyser grønt når AUX indgangen er aktiv.
16. Hvis en af de to indgange bliver deaktiveret, så vil ikonerne holde op med at lyse.

Batterierne

Når din MiniTech Pro er tændt, og batterierne er i god stand, så lyser tænd/sluk ikonet **grønt**.

Ikonet **blinker rødt** når der er mindre end 8 timer, til at batterierne skal skiftes.

Ikonet **lyser konstant rødt** når batterierne er næsten løbet tør.

Hvis der **ikke er noget lys** når du tænder din MiniTech Pro, så er batterierne løbet helt tør.

Tekniske specifikation

Reserve dele

| | |
|-------------|--|
| 1002 | MiniTech Pro |
| 105 | Batterier |
| 490-1020-01 | MiniTech Pro emballage |
| 940-1014-01 | MiniTech Pro original brugervejledning |
| 101 | Hovedtelefoner |
| 104 | Stumpmikrofon |
| 202/M | Mikrofon med 1,5 m ledning |
| 202/C | Mikrofonklips |
| 103MEG | 3m. forlængerledning |
| 910-1003-01 | QR halsslynge |

Specifikationer

| | |
|-----------------------------------|---|
| Frekvens | 65Hz - 6.5KHz |
| Maksimal lydforstærkning | 45 dB |
| Maksimal lydstyrke | 112 dB |
| Tonekontrol | 10 dB range 300Hz, 10dB range 5KHz |
| Mikrofon | Plastikmagnet kondensator |
| Strømforsyning | 2 x AA batterier |
| Forbindelser | 3, 5mm jackstik til mikrofon/AUX indgang, hovedtelefoner og halsslynge. |
| Batterilevetid med hovedtelefoner | Op til 120 timer |
| Batterilevetid med halsslynge | Op til 50 timer |
| Vægt med batterier | 101 gram |
| Størrelse med bælteklips | 85(H) x 55 (B) x 30 (D) mm |

Genbrugsdirektiver

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Affald af elektrisk og elektronisk udstyr) er lanceret for at sikre, at produkter, som har nået enden af deres levetid, bliver genbrugt på den bedst tænkelige måde. Når dette produkt ikke længere kan bruges, må det ikke smides i husholdningskraldespanden. Brug venligst en af disse bortskaffelsesmuligheder:



-Fjern batterierne, og kom dem i en passende genbrugscontainer. Kom produktet i en passende genbrugscontainer.



-Produktet kan også afleveres hos forhandleren. Hvis du køber et nyt produkt, bør forhandleren tage imod det gamle.

Hvis du følger disse instruktioner, er du med til at beskytte mennesker og miljø.