

Bruksanvisning

Hodebøylemikrofon mod. 10,
med 4P mini XLR

HODEB10-4

VARENØ.: 1710



HODEB10 er en solid mikrofon av meget høy kvalitet som framhever konsonantene i talen og dermed taleforståelsen. Diskret utforming, god passform og gode justeringsmuligheter. Samme element som HODEB8 men med mindre bøyle. Kulekarakteristikk. Utskiftbar kabel. Beige.

Ta på deg mikrofonen

Mikrofonen bæres med krokene hengende over ørene bakfra.

1. Juster vidden i nakken ved å trekke/skyve på bøylene.
2. Bøy bommen slik at mikrofonen kommer nærme og peker mot munnen uten å komme i direkte kontakt med huden.
3. Sett kontakten i stemmeforsterkeren / mikrofonsenderen.

NB!! Feil tilpasning av mikrofonen medfører ofte “feedback” og kraftig hyling i høyttalerne.

Enkel feilretting

Hvis lyden er dårlig eller det hylar i høyttaleren:

1. Tilpass mikrofonen til brukeren – bøy til nær munnviken.
2. Skru ned volumet på forsterkeren.
3. Unngå å stå rett foran en høyttaler / stemmeforsterker.

Rengjøring utført av bruker

Mikrofonen kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for væskesøl eller sprut med vann.

Lagring når ikke i bruk

Oppbevares på et tørt og støvfritt sted.

Bytte av mikrofonens ledning

Mikrofonen har utskiftbar ledning som en reservedel.

Ledningen er skrudd inn i mikrofonen her.



Skru ut kontakten ut (mot klokken) og skru inn den nye.

Leverandør

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12
3241 Sandefjord
Tel. 3347 3347
Epost: post@vestfoldaudio.no