

# Universalsender (Uni 10 Care)

## Bruksanvisning






Art.: 1727

UNIVERSALSENDER tilkobles utstyr som skal viderevarsle signaler til Care varslingsmottakere. Varsling blir utløst når en av inngangene aktiveres fra tilkoblet utstyr. Universalsender har funksjoner for viderevarsling av mange forskjellige hendelser. Andre varslinger er tilgjengelig på bestilling.

Varslingene er fordelt i to grupper:

- Daglige signaler
- Alarmer

Daglige signaler utløser varsling med lydvolument som er innstilt i Care mottakere. Alarmer varsler alltid med full styrke.

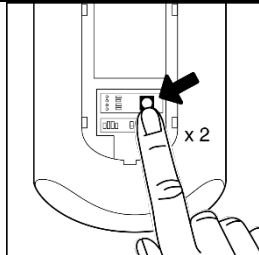
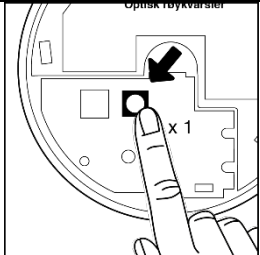
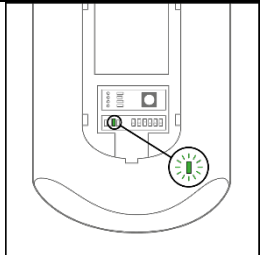
	<p>Lysindikator</p> <p>Lokk</p>
	<p>Batterikontakt</p> <p>LIFE-knapp</p> <p>Funksjonsvelger (ID-velger)</p> <p>Testknapp</p>
	<p>Innganger:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Signalinngang 1 for spenningskilde 3-24 VAC/DC + på tuppen</li> <li>2. Signalinngang 2 for spenningskilde 3-25 VAC/DC + på tuppen</li> <li>3. Signalinngang 3 for potensialfri kontakt.</li> </ol> <p>Sammenkobling av lederne gir signal.</p>

### BATTERI

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år.

### SAMMENKOBLING FØRSTE GANG

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen. Den finnes under lokket.

		
<p>1. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på den ene av enhetene.</p>	<p>2. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den andre enheten. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.</p>	<p>3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast i 2-3 sekunder. Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.</p>

### SAMMENKOBLING AV NY ENHET TIL EKSISTERENDE SYSTEM

1. Trykk 2 ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
2. Trykk 1 gang på LIFE-knappen på den nye enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk. Trykk «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.

### SAMMENKOBLING MISLYKTES

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislyktes den.

Nullstill enheten for å sammenkoble på nytt. (Se nedenfor).

### AVBRYTE SAMMENKOBLING

For å avbryte en aktiv sammenkobling, trykk 1 gang på LIFE-knappen.

### NULLSTILLE SAMMENKOBLINGEN

Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink. Dersom du ønsker å endre funksjoner i produktet, se avsnitt «Utvidede funksjoner».

### MONTERING

Universalsender monteres vanligvis på vegg med den medfølgende borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre veggen. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder. Alternativt kan enheten festes med skruer til veggen gjennom festehullet under batteriet.

### TILKOBLING AV SENSOR

Bruk den medfølgende ledningen. Rød leder går til tuppen på jack-pluggen.

### AC/DC KILDER

Signalkilder med spenningsignal kobles til inngang 1 eller 2. Inngang 1 er polaritetsavhengig

for DC-spenning og krever + på rød leder for å varsle. (Dette er nyttig for tilkobling til alarmsystem som benytter polaritetsvending ved alarm).

### KONTAKT KILDER

Trykk-knapper og relé-signaler kobles til inngang 3.

### DAGLIG BRUK

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på framsiden:

Slukket	Stand-by
Grønt	Varsel sendes
Blinkende rødt/grønt	Bytt batteri

### VELG FUNKSJON (ID-VELGER)

UNIVERSALSENDER har innebygget flere ferdigprogrammerte varslinger. Velg varslings-ID ved å vri på funksjonsvelgeren, som du finner under lokket på framsiden. Varslingene kan ytterligere spesialtilpasses i varslingsmottakeren IRIS DENTAL eller via vår Skytjeneste.

ID	VARSEL	ID	VARSEL
0	Tilkalling rom 1	8	Tilkalling rom 8
1	Tilkalling rom 1	9	Tilkalling rom 9
2	Tilkalling rom 2	A	Tilkalling rom 10
3	Tilkalling rom 3	B	Tilkalling rom 11
4	Tilkalling rom 4	C	Tilkalling rom 12
5	Tilkalling rom 5	D	Tilkalling rom 13
6	Tilkalling rom 6	E	Tilkalling rom 14
7	Tilkalling rom 7	F	Tilkalling rom 15

### VIKTIG INFORMASJON:

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut. Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette. Produktet bør ikke stå i direkte sollys.

### BRUKSBEGRENSNINGER

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

### RESIRKULERING

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

### SIKKERHET

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrus fra hverandre.

**TEKNISKE DATA**

Dim. (bxhxd):	69x133x27mm	Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Vekt m/ batteri	140 g	Batteri:	Litium 3V
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C

**SAMSVARSERKLÆRING**

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

[www.vestfoldaudio.no/samsvar](http://www.vestfoldaudio.no/samsvar)

**FEILSØKING**

<b>Problem</b>	<b>Mulig årsak</b>	<b>Løsninger</b>
Det varsler ikke i mottakere	UNI10- får ikke signal fra kilden / det lyser ikke grønt.	Trykk på Testknappen og sjekk om varselet kommer fram.
	Enhetene er ikke sammenkoblet.	Utfør sammenkobling.
	Signalet er ikke godt	Sjekk tilkoblet signal
	Avstanden mellom UNI10 og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	Batteriet i UNI10 er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
	UNI10 mangler batteri	Sett inn batteri.
	Kontakten er ikke korrekt tilkoblet	Kontroller at sensoren er tilkoblet rett inngang.
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til.
	Batteriet i UNI10 er snart tomt.	Bytt batteri
Det varsler med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelger til riktig posisjon.
Etter TEST-trykk, lyser senderen rødt	Enheten er ikke sammenkoblet	Koble enheten til en mottaker
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Det blinker rødt/grønt i UNI10	Batteriet i UNI10 er snart tomt.	Bytt batteri

