

Velferdssender

VEL10-L



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

<u>1. Innledning</u>	3
<u>2. Oversikt</u>	3
Utvendig	3
Under lokket	4
Batteriet	4
Medfølgende kabel	4
<u>3. Komme i gang</u>	4
Sette inn batteriet	4
Batterieliminatort	4
Sammenkoble enheter	5
Sammenkoble første gang	5
Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system	5
Sammenkobling mislykkes	5
Avbryte sammenkobling	6
Montering	6
Tilkobling av sensor	6
<u>4. I daglig bruk</u>	6
Lysdiodene	6
Velg funksjon (ID-velger)	7
<u>5. Viktig informasjon</u>	8
Bruksbegrensninger	8
<u>6. Tekniske data</u>	8
<u>7. Resirkulering</u>	8
<u>8. Sikkerhet</u>	8
<u>9. Samsvarserklæring</u>	8
<u>10. Feilsøking</u>	9

1. Innledning

Velferdssender VEL10-L er et produkt i FlexiBlink LIFE-serien. Den tilkobles utstyr som skal viderevarsle signaler til FlexiBlink LIFE mottakere.

Varsling blir utløst når en av inngangene aktiveres fra tilkoblet utstyr. Du kan ha så mange varslingsmottakere og sendere som du trenger for sikkerhet og dagligliv.

VEL10-L har funksjoner for viderevarsling av mange forskjellige hendelser. Andre varslinger er tilgjengelig på bestilling.

Varslingene er fordelt i to grupper:


- 1 Daglige signaler
- 2 Alarmer

Daglige signaler utløser varsling med lydvolument som er innstilt i FlexiBlink LIFE varslingsmottakere, mens alarmer alltid varsler med full lydstyrke.

VEL10-L benytter et spesialbatteri med svært lang levetid.


2. Oversikt

Utvendig

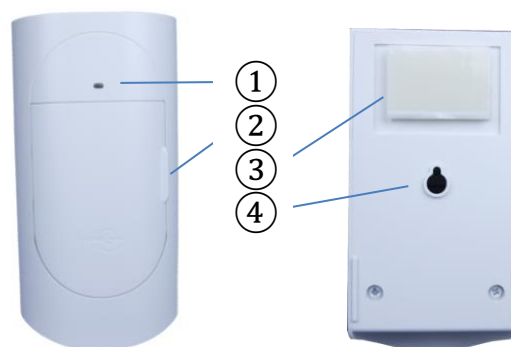

Figur 1 Framside


Figur 2 Bakside

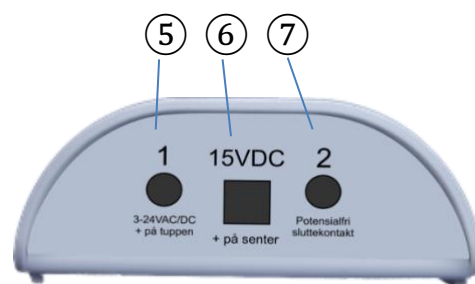

Figur 3 Bunn med 3,5mm jack-tilkoblinger

- ① Lysindikator
- ② Lokk
- ③ Borrelås-tape
- ④ Hull for skruefeste
- ⑤ Signalingang nr. 1 for spenningskilde. 3-24VACVDC + på tuppen
- ⑥ Tilkobling for batterieliminatortilkobling 15VDC
- ⑦ Signalingang nr. 2 for FlexiBlink sensorer og potensialfri kontakt. (Sammenkobling av lederne gir signal.)

Under lokket

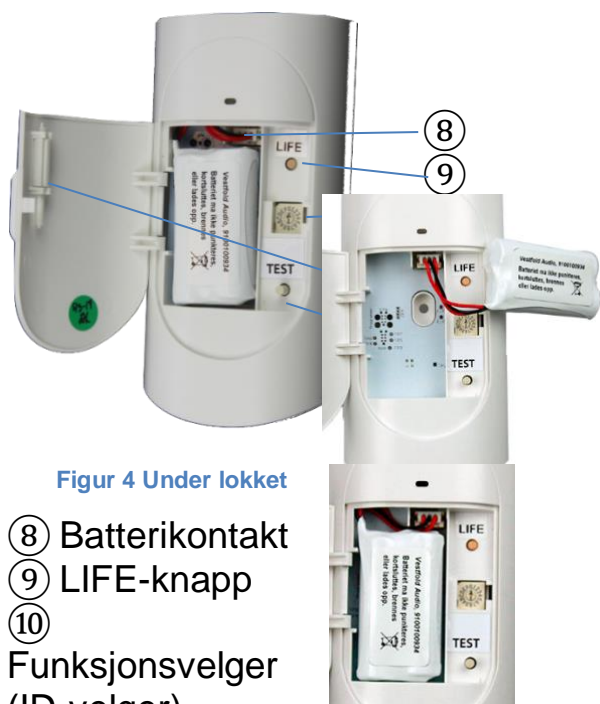

Figur 4 Under lokket

- ⑧ Batterikontakt
- ⑨ LIFE-knapp
- ⑩ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ⑪ Verktøy for innstillinger
- ⑫ Testknapp

Batteriet

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år.

Batteriet må ikke lades opp.



Medfølgende kabel

Det følger med en tilkoblingskabel med 3,5mm jack-plugg, som passer i de 2 signalinngangene.



Rød leder går til tuppen på jack-pluggen.

3. Komme i gang

Sette inn batteriet

Sett inn batteriets kontakt som vist i figuren til høyre. Ved tilkobling av batteri kan VEL10-L blinke grønt i opptil et par minutter mens batteriet klargjøres for lang tids bruk.

Før ledningen i en bue inn i åpningen og legg inn batteriet.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.

Batterieliminators

Dersom det skal benyttes en timer (på/av til faste tider i døgnet) med VEL10-L, må en benytte en batterielimator. Denne kan kjøpes som tilbehør (Varenr. 9100100451).

Batterieliminatoren kobles inn i kontakten © i bunnen av VEL10-L. Ved bruk av timer, skal IKKE batteriet settes inn!


Sammenkoble enheter

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen.

Den finnes under lokket foran på VEL10-L. Se figur 4 på forrige side.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

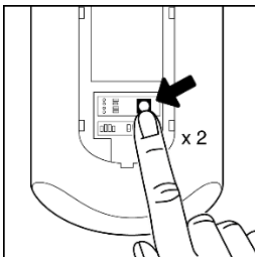

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.



3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

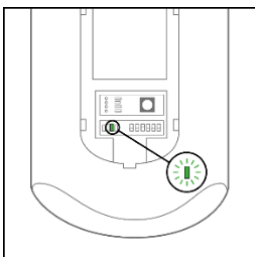

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk. Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet i eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.


Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Da må du nullstille enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

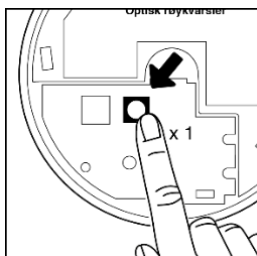

Montering

VEL10-L monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre vegg. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

Alternativt kan enheten festes med skrue til vegg gjennom festehullet under batteriet.



Forsiktig

Vær forsiktig når du skrur inn skruen slik at den omkringliggende hvite platen ikke skades.

Tilkobling av sensor

Bruk den medfølgende ledningen. Rød leder går til tuppen på jack-pluggen.

4. I daglig bruk

Lysdiodene

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på framsiden:

<i>Slukket</i>	Stand-by
<i>Grønt</i>	Varsel sendes
<i>Blinkende rødt/grønt</i>	Bytt batteri

Velg funksjon (ID-velger)

VEL10-L kan varsle mange forskjellige typer hendelser. Vri på Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer til det som skal varsles i mottakerne.

Benytt gjerne den korte enden på det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Funksjonsvelger
(fabrikkinnstilling)

ID-tabellen – velg varslingstype

ID	Varsel ved signal PÅ	Varsel ved signal AV	Type	Kommentarer
0	Vandring inne	-	Daglig	Sensorer: PIR-Gardin, PIR-Mini, ol.
1	Vandring ute	-	Alarm	Sensorer: Dørkontakt, PIR-Gardin
2	Det er natt – ikke gå ut	-	Daglig	Sensorer: Dørkontakt, PIR-Gardin
3	Epilepsialarm	-	Alarm	Epilepsialarmenhet
4	Husk å ta medisinen din	-	Daglig	Medisindispenser
5	Kaffen er klar	-	Daglig	Brukes med tidsbryter – spesialtilpasses
6	Temperaturen er høy	-	Daglig	Sensor: Termostat – kontakt når over grense. Varsel 1 gang pr. time så lenge det er for varmt
7	Temperaturen er lav	-	Daglig	Sensor: Termostat – kontakt når under grense. Varsel 1 gang pr. time så lenge det er for kaldt
8	-	Vandring inne, (for sengematte)	Daglig	Sensor: Sengematte – kontakt når bruker er i sengen
9	-	Vandring inne, (for sengematte)	Daglig	Varsling etter 30 min ute av seng. Sensor: Sengematte – kontakt når bruker er i sengen
A	Lukk igjen kjøleskapet		Stille	Varsel etter 5 min, og hvert 5. min når den er åpen Registrerer åpning og lukking
B	Lukk igjen fryseren		Stille	Varsel etter 5 min, og hvert 5. min når den er åpen Registrerer åpning og lukking
C	Assistanse ønskes		Daglig	
D	Generell varsling		Stille	Nr. 1 - Stille varsel Aktiv og passiv
E	Generell varsling		Stille	Nr. 2 - Stille varsel Aktiv og passiv
F	Generell varsling		Stille	Nr. 3 - Stille varsel aktiv og passiv

5. Viktig informasjon

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.
Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.
Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Bruksbegrensninger

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

6. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 69x133x27mm
Vekt m/ batteri: 140 g
Batteri: Litium 3 V
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.
Temperatur: -10 °C - +40 °C
Radiofrekvens: 868.1–869.85 MHz

7. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

8. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke skrues fra hverandre. Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

9. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettsadresse:
www.vestfoldaudio.no/samsvar

10. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsler ikke i mottakere	VEL10-L får ikke signal fra kilden / det lyser ikke grønt.	Trykk på Testknappen og sjekk om varselet kommer fram.
	Enhetene er ikke sammenkoblet.	Utfør sammenkobling.
	Signalet er ikke godt	Sjekk tilkoblet signal
	Avstanden mellom VEL10-L og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	Batteriet i VEL10-L er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
	VEL10-L mangler batteri	Sett inn batteri.
	Kontakten er ikke korrekt tilkoblet	Kontroller at sensoren er tilkoblet rett inngang.
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til.
	Batteriet i VEL10-L er snart tomt.	Bytt batteri
Det varsler med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelger til riktig posisjon.
Etter TEST-trykk, lyser senderen rødt	Enheten er ikke sammenkoblet	Koble enheten til en mottaker
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Det blinker rødt/grønt i VEL10-L	Batteriet i VEL10-L er snart tomt.	Bytt batteri

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.

blank side

Notater:



Vestfold Audio AS

Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

tel. +47 33 47 33 47

