

DK BRUGERVEJLEDNING
Echo MegaLoop



Indhold

Sikkerhedsinstrukser	3
Oversigt over pakkens indhold	4
Produktoversigt	5
Figur 1	5
Figur 2	5
Figur 3	6
Figur 4	6
Installationsvejledning	7
Hjælp til opsætning	8
Forbindelse til TV med analog lydudgang	8
Forbindelse til TV med digital lydudgang	9
Vigtige informationer	10
Tekniske specifikationer	10

Sikkerhedsinstrukser

- Du kan skade din hørelse, hvis du lytter til for høje lyde i længere tid.
- Når du bruger en af følgende: mikrofon, line input, hovedtelefoner eller halsteleslynge, så skal du sikre dig at: Stikket er sat korrekt i og at lyden er skruet helt ned (drej knappen mod uret) før du tænder for enheden. Du risikerer høreskader, hvis ovenstående ikke instruks ikke efterfølges.
- Undlad at bruge produktet i fugtige, våde, meget varme- eller kolde miljøer.
- Rengør udelukkende produktet med en blød klud og uorganisk rengøringsmiddel.
- Brug kun adaptere som er designet og godkendt til brug med dit høreapparat.
- Placer produktet således at der er rigelig mulighed for ventilation.
- Undlad at åbne enheden eller på anden vis forsøge at reparere den, få i stedet en fagtekniker til at hjælpe.


Oversigt over pakkens indhold

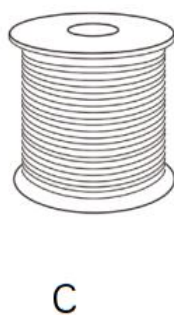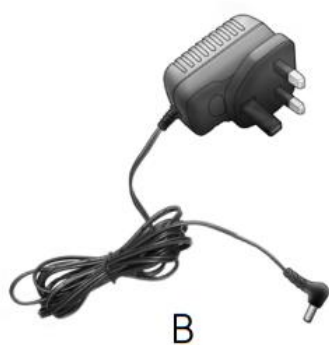


- A. MegaLoop forstærker
- B. Strømforsyning
- C. Teleslyngeledning
- D. Monteringsklips
- E. Mikrofon
- F. Scartstik
- G. Phono-phono kabel

Produktoversigt


Figur 1

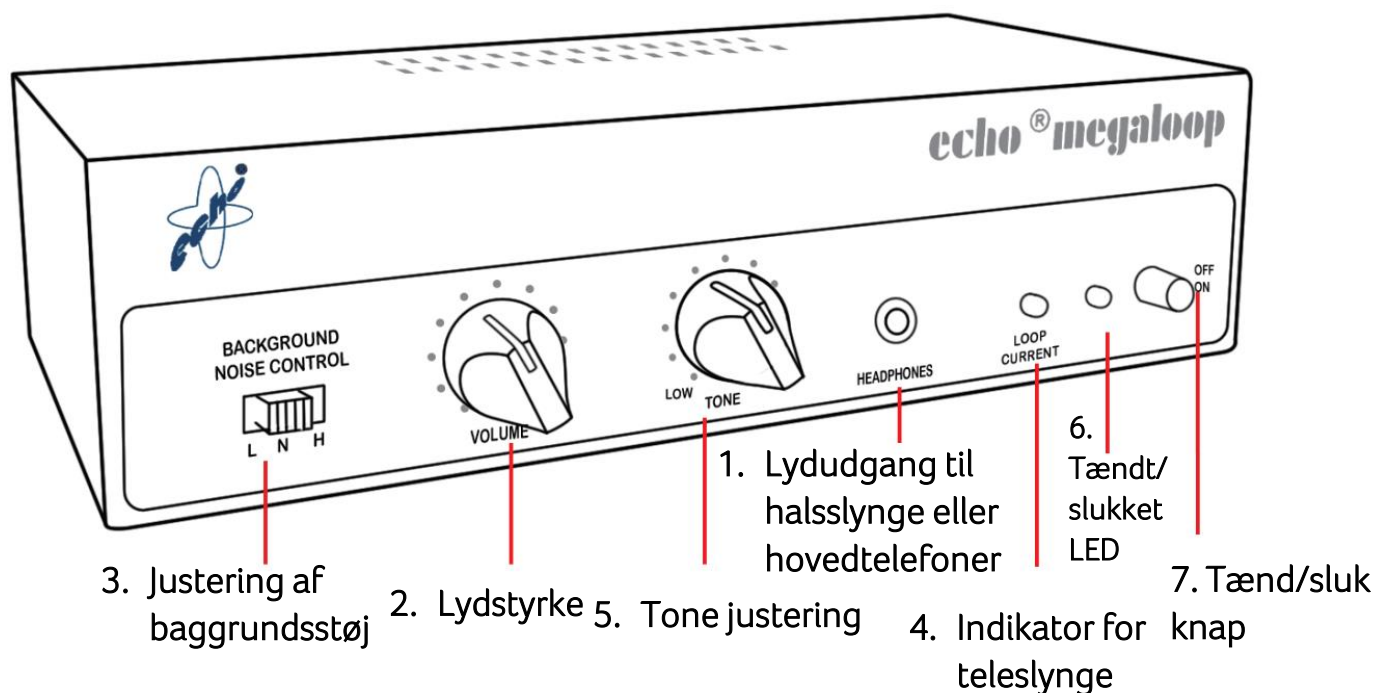

Figur 2

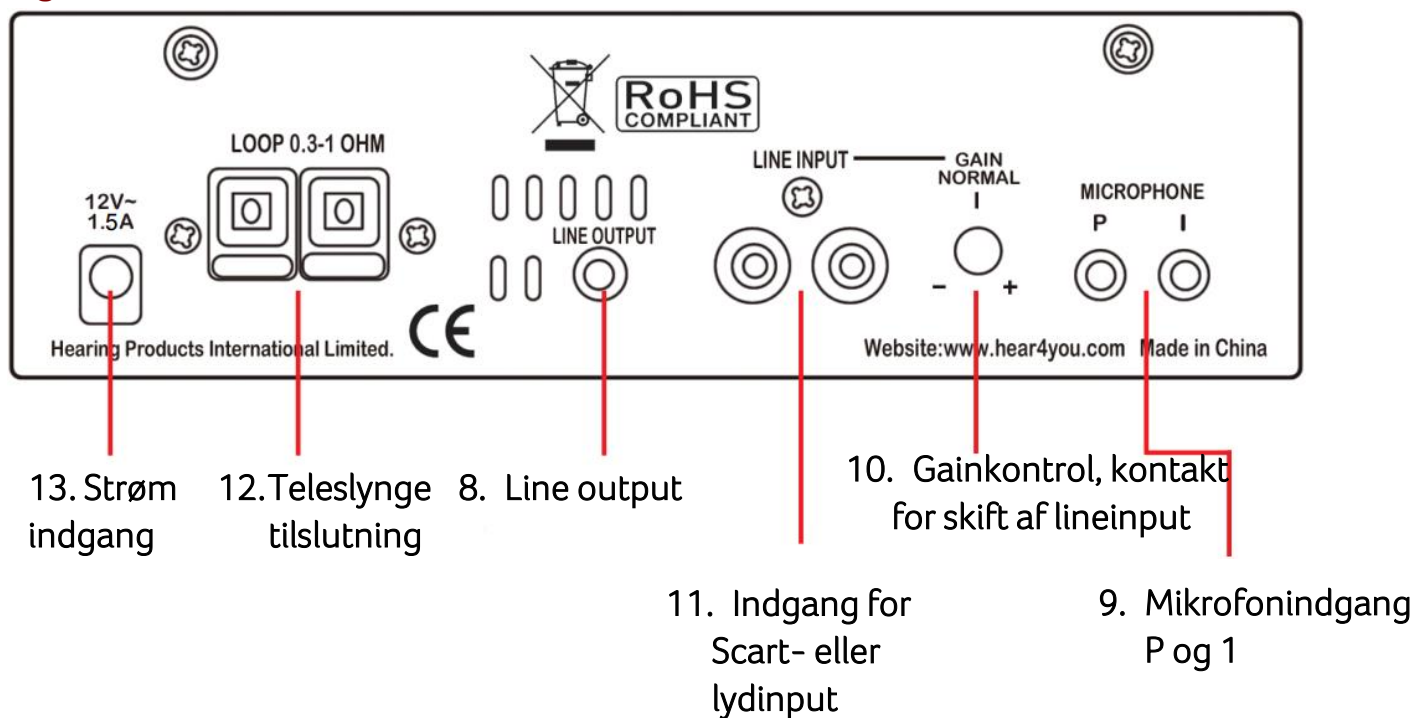


Figur 3

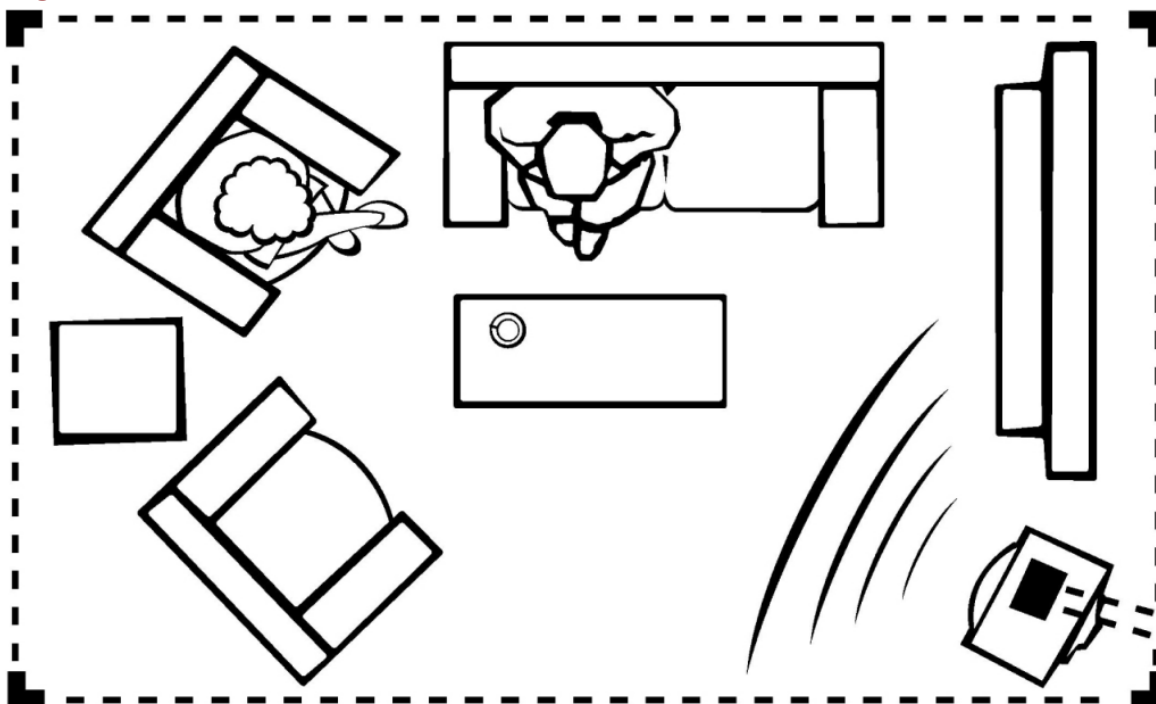

Figur 4

Mikrofon
monteret på
Tv'ets højttaler
med velcro

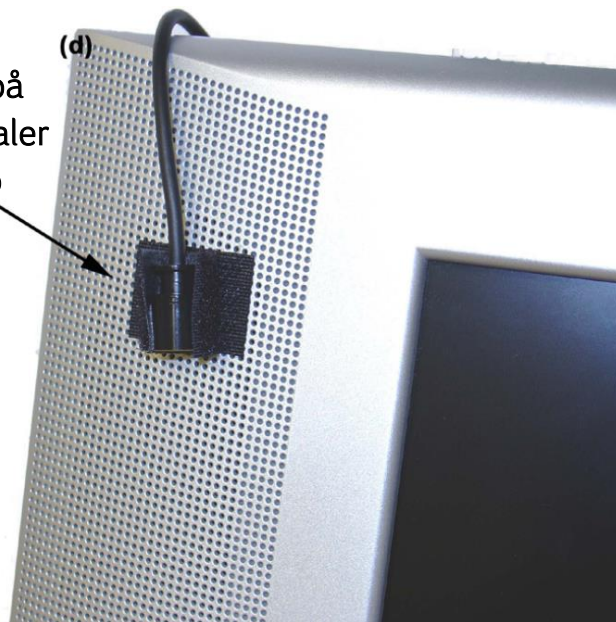

Installationsvejledning

1. Placer din MegaLoop forstærker ved dit TV eller anden ønsket lydkilde. Tjek at der er mulighed for ventilation og et ledigt strømstik til rådighed.
2. Sæt din strømforsyning (B) i stikkontakten og tilslut den derefter til din MegaLoop (8, figur 2).
3. Træk teleslyngeledningen rundt langs kanten af rummet, startende- og sluttende ved din MegaLoop forstærker. Ledningen kan ledes henover dørkarme, hvis det er nødvendigt, og kan også ledes under tæpper eller monteres på fodpanelerne (figur 3).
4. Fjern overskydende teleslyngeledning, og afisolér begge ender af ledningen. Teleslyngeledningen tilsluttes herefter din MegaLoop forstærker (9, figur 2).
5. Hvis du ønsker at bruge en pudeslynge (valgfrit) skal du tilslutte den i (9, figur 2).
6. Forbind phono-phono kabel (G) til Tv'ets lydudgang, hvis det har et sådan. Forbind herefter kablet til din MegaLoop (10, figur 2).

Har dit TV ikke en lydudgang kan du i stedet benytte det medfølgende Scart stik (F), hvori du kan sætte phono-phono kablet, og derfra ind i din MegaLoop (10, figur 2).


Kan du heller ikke tilslutte et Scart stik, kan du i stedet benytte mikrofonen. Forbind mikrofonens ledning til din MegaLoop (12, figur 2) og monter herefter mikrofonen på Tv'ets højttaler med velcro (figur 4).

7. Tænd nu for din MegaLoop ved at trykke på tænd/sluk knappen (7, figur 1). Tænd/sluk LED vil nu lyse grønt (6, figur 1).
8. Test af din opsætning: Sæt baggrundsstøj til N (1, figur 1), tal ind i mikrofonens i et normalt toneleje, skrue op for lydstyrken. Når indikatoren for teleslyngen (5, figur 1) lyser rødt ved du at din MegaLoop opsætning virker. Indstil herefter lydstyrken til dit ønskede niveau.

Hjælp til opsætning

Forbindelse til TV med analog lydudgang

Det kan ikke anbefales at tilslutte din MegaLoop til dit TV via Scart stikket. Det kan resultere i forkerte lyde, og lyd der ikke er synkroniseret med billedet. Du bør i stedet vælge en af følgende fremgangsmåder:

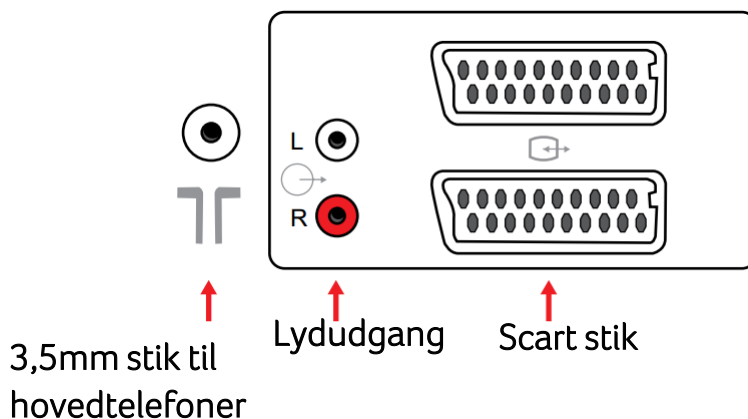

Valgmulighed 1: Du bør som det første undersøge om dit TV har et sæt røde og hvide lydudgange – typisk på bagsiden eller bag et dæksel på dit TV. De er ofte markeret med en pil der peger ud af en cirkel. Se ovenstående illustration. Du er sikret korrekt lyd, såfremt du bruger denne mulighed.


Bemærk: De røde, hvide og gule stik er ikke lydudgang, men derimod lyd- og billedindgang fra eksterne kilder såsom Blu-ray afspiller eller spillekonsol

Valgmulighed 2: Har dit TV ikke nogen rød-hvid lydudgang kan du i stedet forsøge at benytte 3,5mm stikket til hovedtelefoner. Se ovenstående illustration. Her skal du blot sætte dit medfølgende 3,5mm lyd-kabel i stikket, og se om dit TV slukker for lyden i højttalerne. Hvis lyden bliver slukket i højttalerne bør du gå videre til valgmulighed 3. Ellers skal du herefter justere dit Tv's hovedtelefon-lydniveau til ca. 2/3 af maks.

Valgmulighed 3: Såfremt valgmulighed 1 og 2 ikke er mulige for dig kan du i stedet vælge at montere den medfølgende mikrofon direkte på dit Tv's højttaler. Her opnår du den bedste lyd ved at indstille dit Tv's bassniveau til ca. 1/4 af maks. og diskanten til ca. 3/4 af maks. Og hvis muligt, indstil lyden til mono.

Forbindelse til TV med digital lydudgang

Mange nye TV har ikke analoge lydudgange, men derimod en digital coaxial lydudgang (sort og rund) eller en digital optisk lydudgang (rød og firkantet). Nedenstående illustration viser hvordan de to ser ud. Ønsker du at forbinde din Echo MegaLoop til en digital lydudgang skal du bruge en digital-til-analog konverter. Kontakt Tonax A/S for yderligere informationer.

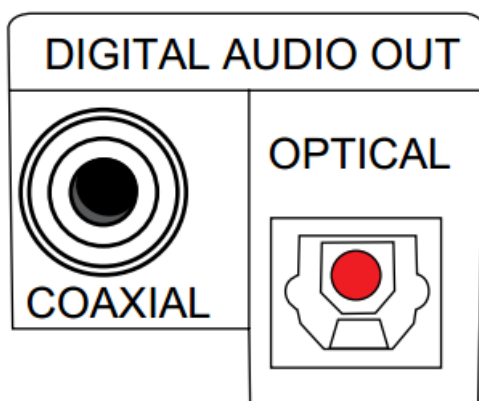

Vigtige informationer

MegaLoops mikrofon er meget følsom og et for højt lydniveau fra dit TV kan forvrænge lyden i dit høreapparat sat til T-funktion. Dit Tv's lydniveau bør være indstillet til et niveau behageligt for en person med normal hørelse.

Prioriteret mikrofon funktion

Der er to mikrofonstik på din MegaLoop (12, figur 2) markeret med (1) og (P). Stik (1) er din standard indgang når du forbinder mikrofonen til et TV eller en anden lydkilde. Stik (P) er en prioriteret indgang, der benytter en højere lydstyrke end (1). Dette er brugbart når du benytter en sekundær mikrofon til at opfange baggrundslyde som skal kunne høres over dit Tv's lydbillede.

Tonekontrol (3, figur 1)

Tilpas tonen til dit høretab. De fleste personer foretrækker tonekontrollen sat så knappen svarer til kl. 12 på et ur.

Brug af hovedtelefoner (3, figur 1)

Alle standard hovedtelefoner eller halsslynger kan bruges sammen din Echo MegaLoop. Når du sætter et sæt hovedtelefoner i bør du skrue helt ned for lyden på din MegaLoop og herefter langsomt justere lyden op til et behageligt niveau.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning	12v DC, min. 1,5amp Output positiv + center.
Output	Output spænding > 3amp maks. spænding, teleslynge modstand mindre end 1 ohm.
Frekvens	100Hz til 5,2kHz (v/c mid)
Tonekontrol effekt	20dB rækkevidde maks-min. (v/c mid)
Mikrofon	2 mikrofonindgange. 3,5mm mono kondensator.
Line input	2 line-level indgange, phono forbindelse med gainkontrol
Line output	1 line-level udgang 3,5mm mono, nominal -6dBu, output impedans 100ohm.
AGC	Attack time 60ms, recovery time 760ms.
Dimensioner	186mm(B) x 50mm(H) x 82mm(D).

Genbrugsdirektiver

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Affald af elektrisk og elektronisk udstyr) er lanceret for at sikre, at produkter, som har nået enden af deres levetid, bliver genbrugt på den bedst tænkelige måde. Når dette produkt ikke længere kan bruges, må det ikke smides i husholdningskraldespanden. Brug venligst en af disse bortskaffelsesmuligheder:



-Fjern batterierne, og kom dem i en passende genbrugscontainer. Kom produktet i en passende genbrugscontainer.



-Produktet kan også afleveres hos forhandleren. Hvis du køber et nyt produkt, bør forhandleren tage imod det gamle.

Hvis du følger disse instruktioner, er du med til at beskytte mennesker og miljø.