


DK Quickguide
Echo MegaLoop


Oversigt over pakkens indhold

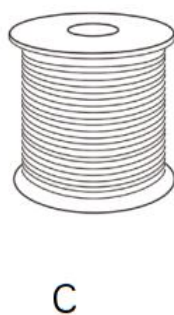


- A. MegaLoop forstærker
- B. Strømforsyning
- C. Teleslyngelledning
- D. Monteringsklips
- E. Mikrofon
- F. Scartstik
- G. Phono-phono kabel

Produktoversigt

Figur 1

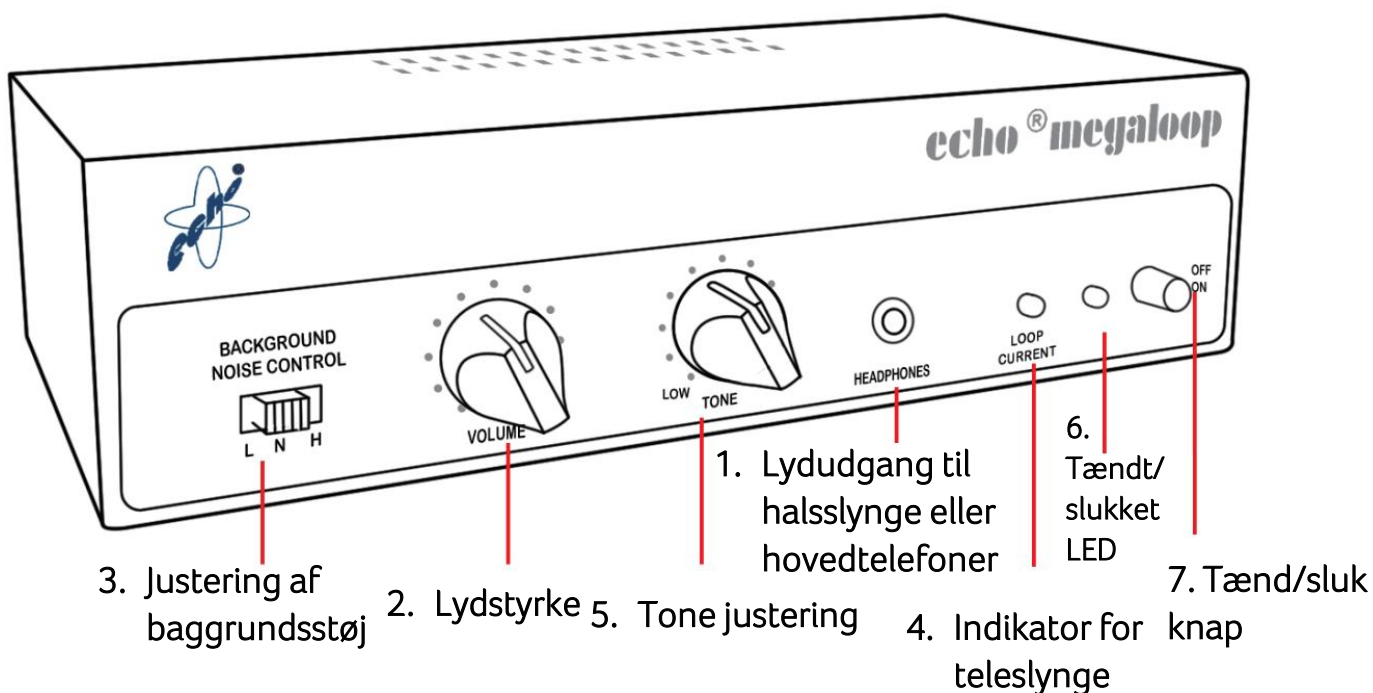

Figur 2

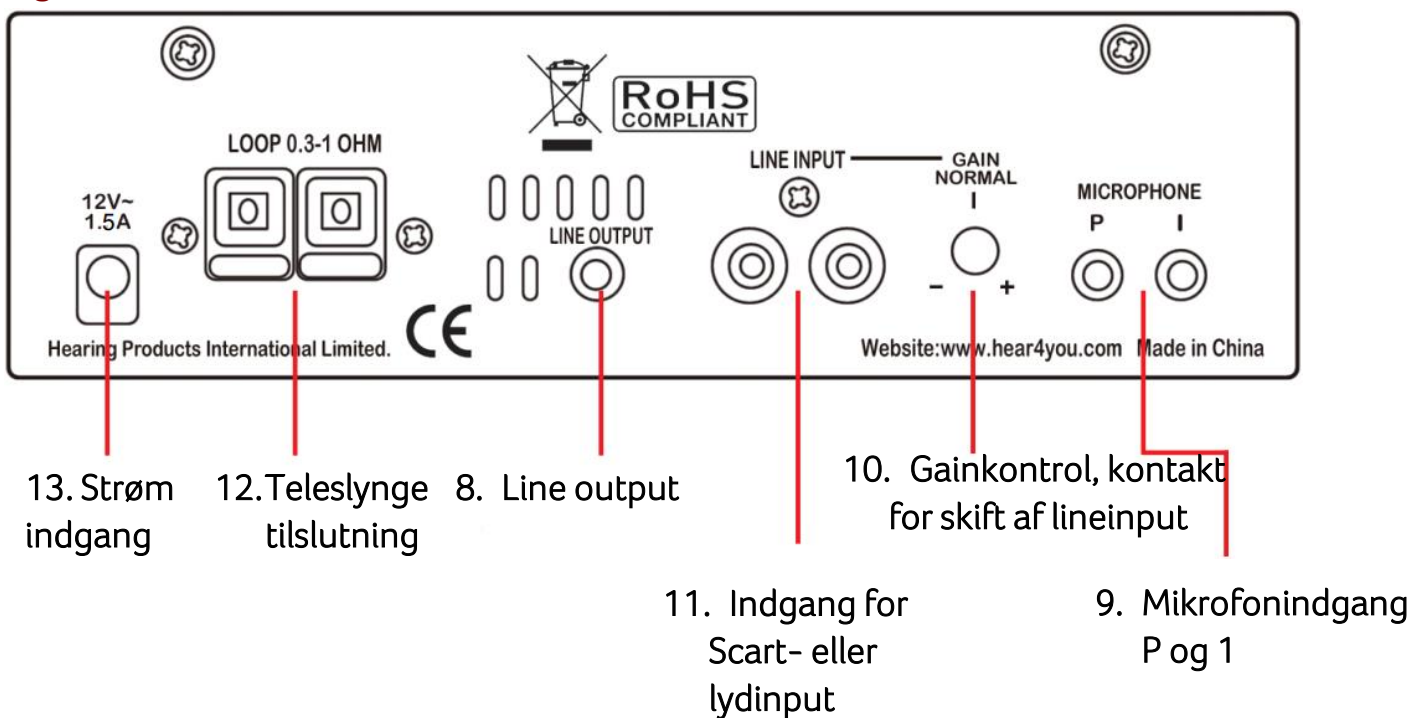

Installationsvejledning

1. Placer din MegaLoop forstærker ved dit TV eller anden ønsket lydkilde. Tjek at der er mulighed for ventilation og et ledigt strømstik til rådighed.
2. Sæt din strømforsyning (B) i stikkontakten og tilslut den derefter til din MegaLoop (8, figur 2).
3. Træk teleslyngeledningen rundt langs kanten af rummet, startende- og sluttende ved din MegaLoop forstærker. Ledningen kan ledes henover dørkarme, hvis det er nødvendigt, og kan også ledes under tæpper eller monteres på fodpanelerne (figur 3).
4. Fjern overskydende teleslyngeledning, og afisolér begge ender af ledningen. Teleslyngeledningen tilsluttes herefter din MegaLoop forstærker (9, figur 2).
5. Hvis du ønsker at bruge en pudeslynge (valgfrit) skal du tilslutte den i (9, figur 2).
6. Forbind phono-phono kabel (G) til Tv'ets lydudgang, hvis det har et sådan. Forbind herefter kablet til din MegaLoop (10, figur 2).

Har dit TV ikke en lydudgang kan du i stedet benytte det medfølgende Scart stik (F), hvori du kan sætte phono-phono kablet, og derfra ind i din MegaLoop (10, figur 2).

Kan du heller ikke tilslutte et Scart stik, kan du i stedet benytte mikrofonen. Forbind mikrofonens ledning til din MegaLoop (12, figur 2) og monter herefter mikrofonen på Tv'ets højttaler med velcro (figur 4).

7. Tænd nu for din MegaLoop ved at trykke på tænd/sluk knappen (7, figur 1). Tænd/sluk LED vil nu lyse grønt (6, figur 1).
8. Test af din opsætning: Sæt baggrundsstøj til N (1, figur 1), tal ind i mikrofonens i et normalt toneleje, skrue op for lydstyrken. Når indikatoren for teleslyngen (5, figur 1) lyser rødt ved du at din MegaLoop opsætning virker. Indstil herefter lydstyrken til dit ønskede niveau.