

DK

Quickguide

Echo MegaLoop PRO



Echo® MegaLoop Pro™
Produkt Kode: 901-1010-02



Brugervejledning
Hearing Products International Limited.

Sikkerhedsinstrukser


Benyttes produktet ikke i henhold til sikkerhedsanvisningerne kan fabrikanten ikke stilles ansvarlig for eventuelle skader.


1. Du kan skade din hørelse, hvis du lytter til for høje lyde i længere tid.
2. Forkert brug kan påvirke din hørelse. Følg derfor instruktionerne trinvist.
3. Rengør udelukkende MegaLoop Pro™ og dets tilbehør med en blød klud og uorganisk rengøringsmiddel.
4. Brug kun adaptere, som er designet og godkendt til brug med dit høreapparat.
5. For at undgå risiko af elektronisk stød eller personlig skade bør du altid tage basale sikkerhedsforanstaltninger i betragtning.
6. Læs og forstå instruktionerne inden brug og følg altid advarsler og instruktioner på enheden.
7. Undlad at bruge produktet i fugtige, våde, meget varme- eller kolde miljøer.
8. Placer altid produktet på en stabil og sikker overflade, og installer det altid et sted, hvor ledningen ikke bliver beskadiget eller udgør en snublefare.
9. Placer produktet således, at der er mulighed for ventilation, da produktet kan blive varmt ved brug.
10. Henvis venligst al service til kvalificeret personale. Hvis serienummeret fjernes, er garantien ugyldig.

Oversigt over pakkens indhold


- A. MegaLoop forstærker
- B. Strømforsyning
- C. Teleslyngeledning
- D. Monteringsklips
- E. Mikrofon

- F. Scartstik
- G. Phono-phono kabel
- H. TOSlink kabel
- I. Fjernbetjening
- J. AAA batterier (2 stk)

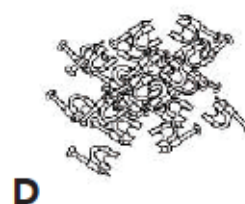

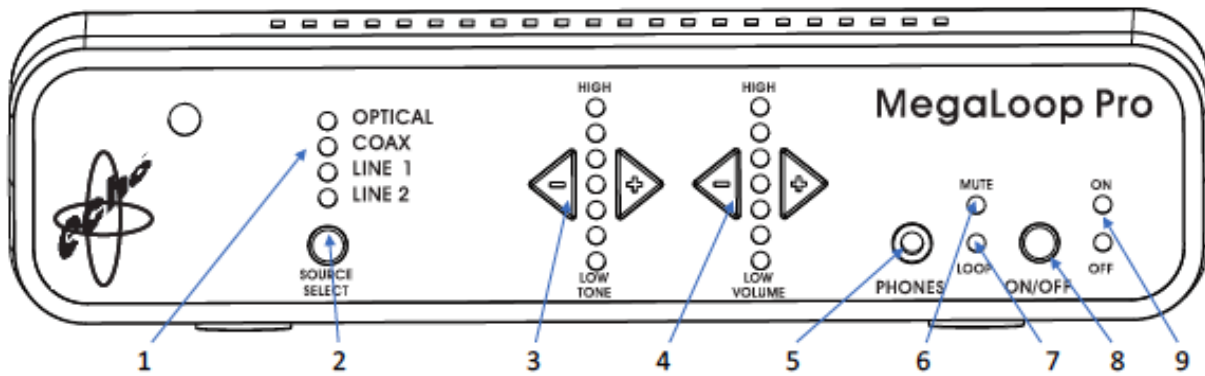

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Digital lydindgangs indikator | 6. Lydløs indikator |
| 2. Valg af kanal | 7. Teleslynge indikator |
| 3. Tone kontrol | 8. Tænd/sluk knap |
| 4. Lydstyrke | 9. Tænd/sluk indikator |
| 5. Indgang til høretelefon | |

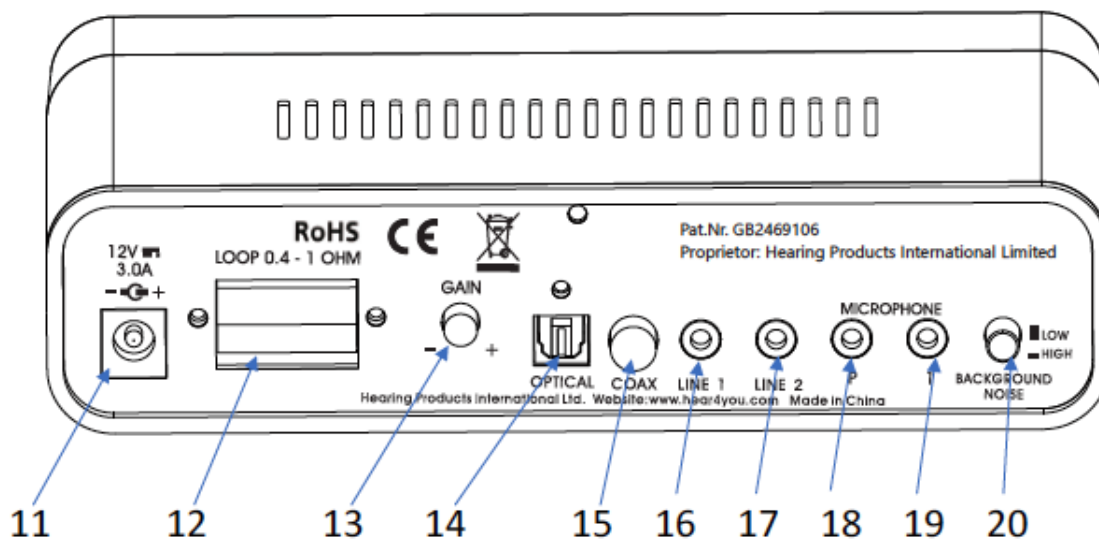

- | | |
|--|---------------------------------|
| 11) DC strøm indgang | 16) Linje 1 indgang |
| 12) Teleslyngekabel forbinder | 17) Linje 2 indgang |
| 13) Genvind kontrol | 18) Prioritets mikrofon indgang |
| 14) Optisk digital lyd kabel indgang | 19) Mikrofon indgang 1 |
| 15) Koaksial digital lyd kabel indgang | 20) Baggrundstøj kontrol |

Installationsvejledning

1. Placer din MegaLoop PRO forstærker ved dit TV eller anden ønsket lydkilde. Tjek at der er mulighed for ventilation og et ledigt strømstik til rådighed.
2. Start fra forstærkeren og lad teleslyngeledningen (C) løbe rund i rummet. Det kan fastgøres et fodpanel, billedliste eller under et gulvtæppe ved brug af monteringsklips (D). Ledningen kan også fæstnes over dørkarme hvis nødvendigt. Sørg for at efterlade nok ledning til at nå forstærkeren.
3. Hvis du bruger en LOOP PAD (valgfrit) placer da denne i en passende position på den valgte stol, og forbind starten af denne til kabelforbinderen (12). Læg ledningen, hvor den ikke udgøre snublefare.
4. Fjern overskydende teleslyngeledning, og afisolér begge ender af ledningen, når din teleslynge er sat op i hele rummet. Teleslyngeledningen tilsluttes herefter din MegaLoop PRO forstærker (12). Tryk på knappen på din teleslyngeforbinder (12) og et hul vil komme til syne, indsæt kabel (C) og slip knappen for at låse kablet på plads.

Forbindelse

Lydforbindelsen vil opnå højeste kvalitet uden baggrundsstøj.

5. Når du tilslutter til et TV, der har digital optisk lyd udgang, brug da TOSlink kablet (H) til at forbinde fra TV digital udgang til optisk digitale indgang på forstærkeren (14). Brug kanalknappen (2) til at vælge indstilling for digital lyd forbindelse.
6. Ved forbindelse til et TV med koaksial lydudgang brug da et koaksial kabel (ikke inkluderet) til koaksial lydudgangen på TV'et og forbind det med koaksial indgangen på forstærkeren (15). Brug kanalknappen (2) og vælg indstillingen for koaksial lyd.

OBS: Du skal muligvis ændre indstillingerne på dit TV's digitale udgang til PCM så den digitale lyd passer til teleslyngforstærkeren.

7. Ved forbindelse til TV med analog lydudgang forbind da phono-phono kabel (G) til TV'ets lydudgang. Forbind herefter kablet til din forstærker (16 eller 17). Brug kanalknappen (2) til at vælge den rette indstilling.
8. Hvis dit TV eller andre lydkilder ikke har en telefon udgang, kan du i stedet benytte det medfølgende Scart stik (F), eller phono-phono kablet (G). Vær venligst opmærksom på, at den indvendige højttaler kan blive slået fra når du bruger phone-phone kablet i høretelefonudgangen.
9. Hvis direkte forbindelse ikke er muligt ved brug af mikrofonen (E), forbind da det 3.5 mm mikrofonstik ind i mikrofonindgangen på forstærkeren (18 eller 19). Monter herefter mikrofonen på TV'ets højttaler. Mikrofonen kan også benyttes til at tale direkte med teleslyngesystemet, så du kan tale direkte til høreapparatsbrugere mens de lytter til Tv'et. En mikrofon kan bruges samtidig med en linje indgang til at overvåge andre lyde som en dørklokke eller telefon. Der kan bruges to mikrofoner på samme tid.

OBS: Mikrofonerne er meget sensitiv og for høj lyd fra TV højttaleren kan fordreje lyden i dit høreapparat, når det er i "T" indstilling. TV højttalerens lydstyrke bør sættes på et komfortabelt niveau for en normalthørende person.

10. Brug kanalknappen (2) på forsiden af forstærkeren til at vælge den rette lydforbindelse. Et rødt lys (1) vil indikere hvilken kilde, der er valgt indtil strømmen er afbrudt på stikkontakten. Når strømmen igen er tilsluttet er standard lydindgangen optisk.

Strøm

11. Stik strømforsyningen (B) i en stikkontakt nær TV'et eller anden lydkilde, tilslut herefter den anden ende ind i strømindgangen på forstærkeren (11).
12. Tænd nu for din forstærker (8) og et grønt lys (9) vil lyse. Tænd for dit TV. Det røde teleslyngelys (7) burde nu begynde at lyse, dette indikerer at systemet virker. For at starte med at bruge systemet sæt da lydstyrken (4) til midterposition og sæt herefter dit høreapparat til "T" indstilling.
13. For at slukke for forstærkeren tryk da på tænd og sluk knappen (8) og det grønne lys (9) vil skifte farve til rød. Forstærkeren vil herefter være i standby, hvilket bruger minimalt strøm, og der vil ikke blive udsendt nogle signaler.

Næste gang din forstærker tændes vil lydstyrken, tonen og kanalindstillingerne være gemt.

For at slukke alt strøm, koble da forstærkeren fra stikkontakten. Når strømmen tilsluttes igen vil standard indstillingerne igen være optisk. Dine personlige indstillinger vil derfor skulle indstilles igen:

- Sæt TV'et eller andet lydudstyr til normalt lydniveau for andre i huset.
- Vælg den rette lydkanal ved brug af kanalknappen (2)
- Sæt lydstyrkekontrollen til minimum/ normalt toneleje (midterposition)
- Skift dit høreapparat til "T" indstilling.
- Tilpas lydstyrken og tonen til dig.